

## 新型コロナウイルス感染症 抗体検査キット

新型コロナウイルス(COVID-19)に対する「IgM抗体」「IgG抗体」を同時に検出できる抗体検査キットです。本製品は米国食品医薬局(FDA)および安全性能基準(EC)認証済みであり、高い精度での抗体検査が可能です。所要時間はたったの約20分。簡単に検査結果を調べることができます。

### FASTEP(ファステップ)抗体検査キット

価格：オープン

\* 1キット (1テスト分)

#### 2種類の抗体を同時に検査

感染初期に産生されるIgM抗体と、感染後しばらくたってからつくられるIgG抗体の2種類を同時に調べることができます。

#### たった約20分！カンタン抗体検査

わずか1滴の血液を採取して専用プレートに入れ、その上から希釈液を垂らすだけ。15分待てば結果を確認することができます。

#### FDA(アメリカ食品医薬品局)認証

CE認証の検査キットは数多く販売されていますが、FDA認証の製品はあまり多くはありません。FDA認証は信頼の証です。

#### 精度の高い検査結果

	IgM	IgG
陽性精度	93.7%	98.8%
陰性精度	99.1%	98.7%
トータル精度	97.7%	98.7%



#### 〔参考データ〕

##### IgM

	PCR陽性	PCR陰性	計
IgM陽性	74人	2人	76人
IgM陰性	5人	225人	230人
計	79人	227人	306人

##### IgG

	PCR陽性	PCR陰性	計
IgG陽性	82人	3人	85人
IgG陰性	1人	234人	235人
計	83人	227人	310人

## こんな方におすすめします

- ☑ 今は健康状態ではあるものの、過去にコロナにかかっていたかどうか気になっている方。
- ☑ 最近発熱などの体調不良があり今は健康状態に戻ったものの、新型コロナにかかっていたかどうか気になっている方。
- ☑ 高齢の方や基礎疾患を持っている方と同居している方。
- ☑ 接客業で不特定多数の人と接する方や、その様なお店や施設を運営している経営者や管理職の方。
- ☑ 会社としてクラスター発生を未然に防ぎたいと考えている経営者や管理職の方。
- ☑ 社員の福利厚生として抗体検査を導入したいと考えている経営者や管理職の方。

## 使用方法



① しっかりと指のアルコール消毒を行います。



② 採血は指の腹部で専用の器具をつかって行います。



③ スポイトを使って採取した血液を吸い上げます。



④ 吸い上げた血液を所定の位置に入れます。



⑤ ④で入れた血液の上から希釈液を入れます。



⑥ 15分待ちます。

## 注意事項

- ・当検査キットは1回きりの使い捨てです。繰り返し使用することはできません。
- ・当検査キットは新型コロナウイルス(COVID-19(SARS-CoV-2))専用の簡易検査キットです。他のウイルス検査には使用できません。
- ・当検査キットは新型コロナウイルスの抗体の有無を調べるものであり、新型コロナウイルスを診断するものではありません。
- ・当検査キットは簡易検査をおこなうものです。確定診断には、医師や保健所の指導のもとでPCR検査などを受けるようにしてください。



AKATSUKI

株式会社あかつき

千葉営業所：千葉県野田市七光台44

本社：福島県二本松市茶園2-156